

הוראות שימוש אצבעון סיטורציה חכם

מק"ט 59161

אצבעון זה הוא מכשיר נייד וקל משקל המיועד לשימוש ומעקב ביתי למדידה והצגה של רווית החמצן בדם (% SpO2) וקצב פעימות הלב (PR). האצבעון מודד את הסיטורציה והדופק בעזרת חיישן המחובר לאחת אצבעות היד

ההגדרות של גבולות הערכים. מעקב המדדים. וההתראות השונות, מבוצעות ע"י אפליקציה ייעודית שצריך להתקין בטלפון החכם,

באפליקציה מתבצע מעקב קבוע אחרי הנתונים שנמדדים. ויש אפשרות לשלוח אותם לרופא המטפל או כל גורם שתחפצו.

להורדת האפליקציה כנסו לקישור הבא **במכשירים תומכים**: <http://ox.konsung.net:9028/zhs.apk>

הוראות הפעלת האצבעון

- הטען את האצבעון עד שעתיים וחצי שעות לטעינה מלאה. מחוון הסוללה יראה מלא
- הכנס את אחת מאצבעות היד לתוך האצבעון
- במקרה של חיבור האצבעון על אצבע קרה במיוחד או לק לציפורניים או ציפורניים תותבות, עלולות להיות קריאות לא מדויקות של חמצן ודופק.
- לחץ על לחצן ההפעלה שממוקם בקצה המסך ()
- מדדי הסיטורציה והדופק יופיעו במסך וישמע ביפ בזמן המדידה
- אם לא תעשה פעולה כלשהי בתוך 10 שניות לאחר ההדלקה. האצבעון יכבה באופן אוטומטי
- סוללה מלאה מספיקה לכ 20 שעות

אזהרות

1. אין להשתמש בשעון למדידות כאשר הוא נמצא בטעינה
2. אין לנער את היד או האצבעות במהלך המדידה. ואל תזוז בחזקה והשתדל להיות במנוחה

טעינת הסוללה:

אצבעון הסיטורציה משתמש בסוללה מסוג lithium נטענת מובנית ואינה ניתנת להסרה, סמל הסוללה יבהב כאשר קיבולת הסוללה נמוכה

טען את אצבעון הסיטורציה לפי השלבים הבאים:

1. חבר את כבל הטעינה אל כניסת ה- USB של האצבעון
 2. חבר את המתאם לשקע כדי להטעין את האצבעון (סמל טעינת הסוללה מוצג על המסך).
- זמן הטעינה של סוללה ריקה היא עד שעתיים וחצי

שים לב :

הביצועים של סוללת הליתיום הנטענת עלולים להתדרדר עם הזמן. אם זמן ההפעלה של הסוללה קצר באופן ניכר מהאמור במפרט, צור קשר עם מוקד השירות שלנו *6444