


הוראות שימוש למחולל חמצן

מחולל חמצן הנייד של יד שרה אוקסיגרין

המחולל מספק חמצן עד 5 ליטר בדקה המחולל נותן חמצן בפולסים כשמזהה שאיפה המחולל לא מתאים לתינוקות המחולל שוקל כ-3 קילו הספק בטרייה עד 4 שעות תלוי בהספק הנדרש מגיע עם שני מטענים, אחד לבית ואחד לרכב

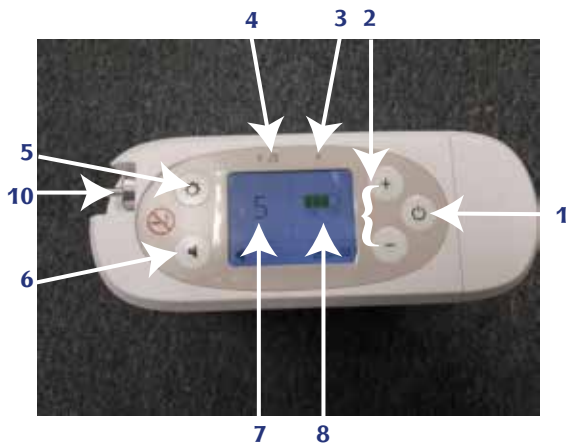

1. הדלקה / כיבוי
2. ויסות כפתור החמצן
3. נורת פעילות תקינה
4. נורת תקלה
5. נתונים על המכשיר
6. הדלקה וכיבוי של הפעמון
7. צג הספק חמצן
8. מצב בטרייה
9. חיבור מטען
10. חיבור משקפיים



- להדלקה לחץ (1) לכיבוי לחץ לחיצה ארוכה על (1)
- לקביעת כמות חמצן לחץ על ה +/- ע"י לחצן (2)
- לחצן (3) נורית בקרה (מהבהבת פעם אחת בשעת הדלקה)
- לחצן (4) נורית תקלה
- לחצן (5) הגדרות מכשיר לשימוש ע"י טכנאי יד שרה מוסמך בלבד
- לחצן (6) מצב שקט

המלצות:

- השימוש במחולל האוקסיגרין באחריות המשתמש בלבד ובהתייעצות רופא
- השאלת המכשיר מותנית בכך שאין יד שרה אחראית במישרין או בעקיפין על כל נזק העלול להיגרם ע"י שימוש במכשיר
- יש להרחיק מאש

חשוב לדעת:

- אין להשתמש במכשיר בעת טעינתו
- אין להטעין יותר מ-4 שעות
- אין להטעין תוך כדי פעולה